


# 鼻血のケアに チケア<sup>®</sup> Chi-care<sup>®</sup>

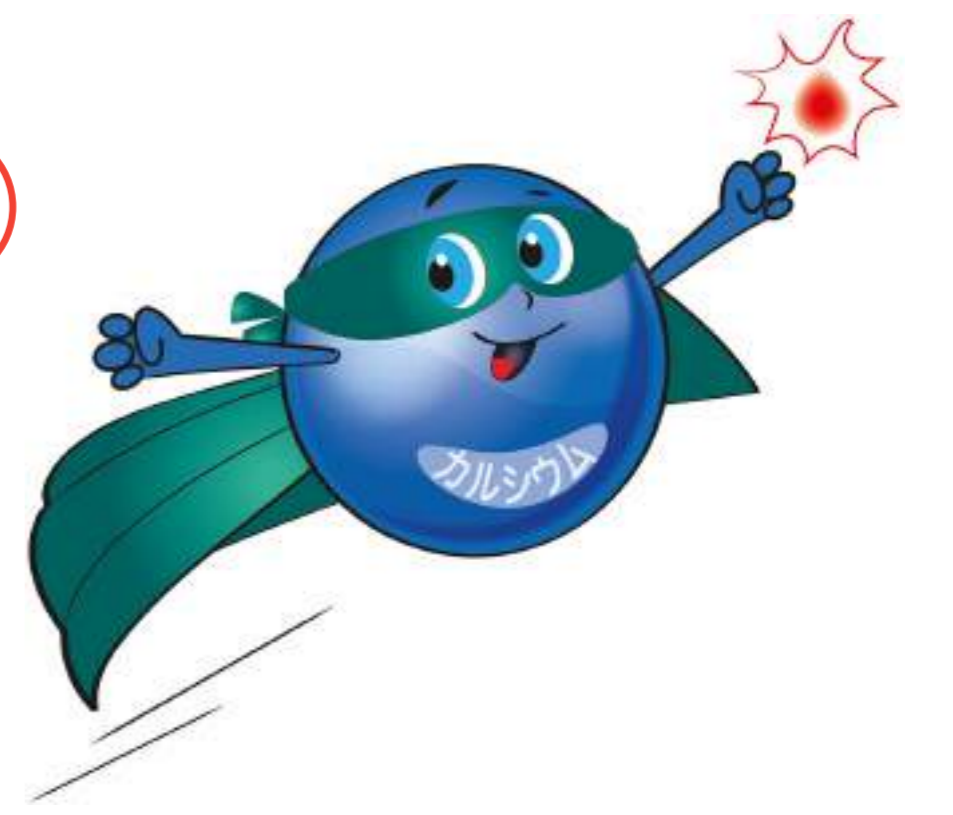

**鼻血のケアに。**  
アルギン酸カルシウム入り医療用不織布

**チケア<sup>®</sup>**  
Chi-care<sup>®</sup>

〈イメージ図〉

- ・医療現場で使用されている天然海藻由来（アルギン酸塩）のバイオポリマーを使用。
- ・からだの凝固因子の一つであるカルシウムイオンを出血部位に放出。
- ・網目構造のファイバーが鼻血を吸収。

**5** 枚入  
単回使用・滅菌済

**ENTFirst**

鼻血のケアに  
開けて、よじって、入れるだけ！



チケア<sup>®</sup>の効果を最大限に引き出すためのアドバイス

鼻腔に挿入する前に生理食塩水で湿らせることで、イオン交換が促進する！



## 使い方はとっても簡単！

- 石鹸またはハンドジェルなどで手を消毒します。
- 前かがみになり、凝血塊を取り除くためにやさしく鼻をかみます。
- 滅菌パックを開封し、チケア<sup>®</sup>を取り出します。
- 鼻腔の大きさに合うように調節します。チケア<sup>®</sup>を生理食塩水で湿らせて柔らかくし、よじってください。
- 鼻腔に挿入し、10分ほど鼻をつまみます。その後、チケア<sup>®</sup>をいれたままにします。
- 30分経ったら、チケア<sup>®</sup>を抜き取ります。

## こんな特長があります

チケア<sup>®</sup>は、オスラー病の患者さんの鼻血および血友病、フォン・ヴィルブラント病などの先天的な凝固異常を有する患者さんの鼻血に効果的です。さらに、抗ビタミンK薬、ヘパリンなどを含む抗凝固療法を受けている患者さんの鼻血にも効果的です。

- シンプルで使いやすい
  - 網目構造のファイバーが鼻血を吸収
  - 滅菌済み個包装で衛生的
  - 大人も子供も利用可
  - ゲル化で取り出し時の痛みを低減
  - 天然海藻由来
- \* 妊娠中の方でもご利用いただけます
- \* 医療現場で使用されている天然海藻由来（アルギン酸塩）のバイオポリマーを使用



お問い合わせ（販売元）



第一医科株式会社  
DAIICHI MEDICAL

☎113-0033 東京都文京区本郷2-27-16  
TEL:03-3814-0111 FAX:03-3814-0135  
<https://www.first-med.co.jp/>

チケア<sup>®</sup>公式サイト <https://chicare.jp/>

